

Sferisch Multifocaal Multifocaal Prestige Bifocaal Torisch Mini-Scleraal

TOEPASSING

Door de overgang van de sferische optische zone naar een sferische periferie in de Tricurve contactlens ontstaat een pasvorm welke de stofwisseling uitstekend verzorgt. Deze constructie maakt het mogelijk in kritische omstandigheden de periferie individueel zodanig aan te passen dat er een optimale pasvorm ontstaat.

VOORDELEN

- + Flexibele pasvorm
- + Individueel maatwerk

GEBRUIKSDUUR

12 - 24 maanden
(afhankelijk van het gekozen materiaal)

Parameters

B.C.R.	6.00 - 10.00 per 0.05 oplopend
STERKTE	+/- 40.00 per 0.25 oplopend
DIKTE	0.20 bij -3.00 per 0.25 oplopend
LENSDIAMETER	8.00- 12.50 per 0.10 oplopend
OPTISCHE ZONE	OZ kan gekozen worden tussen 1.60 en 2.50 mm kleiner dan de lensdiameter
PERIFERIE	aan te passen per +/- 0.10

Aanpas-advies

CORNEA ASTIGMATISME	K VLAK + OF -
0 .00 > 0.50	+ 0.05
0.75 > 1.25	Gelijk aan
1.50 > 2.00	- 0.05
2.25 > 2.50	- 0.10
2.75 > 3.00	- 0.15 of Randtorisch (R.T)
3.25 > 3.50	- 0.20 R.T of Exception
3.75 > 4.00	- 0.25 R.T of Exception
4.25 > 4.50	- 0.30 R.T of Exception

Diameter keuze

2 mm kleiner dan de verticale corneadiameter.