

# Orion / asferisch

VORMSTABIEL

De rand asferische lens voor een grote optische zone

Sferisch  Multifocaal  Multifocaal Prestige  Bifocaal  Torisch  Mini-Scleraal

## TOEPASSING

De Orion is een rand asferische lens die wordt toegepast indien er een grote optische zone noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een grote pupilopening.

## VOORDELEN

- + Grote optische zone
- + Eenvoudig over te stappen naar bi- of multifocaal
- + Ook leverbaar in rand-, buiten- en bi-torisch

## GEBRUIKSDUUR

12 - 24 maanden  
(afhankelijk van het gekozen materiaal)

## Parameters

<b>B.C.R.</b>	6.00 - 10.00 per 0.05 oplopend
<b>STERKTE</b>	+/- 40.00 per 0.25 oplopend
<b>DIKTE</b>	0.16 bij -3.00
<b>LENSDIAMETER</b>	8.00 - 12.50 per 0.10 oplopend
<b>EXCENTRICITEIT</b>	0.40 , 0.60 en 1.00, Orion Q 0.60 (andere excentriciteiten zijn ook mogelijk).

## Aanpas-advies

CORNEA ASTIGMATISME	K VLAK + OF -
<b>0 .00 &gt; 0.50</b>	+ 0.05
<b>0.75 &gt; 1.25</b>	Gelijk aan
<b>1.50 &gt; 2.00</b>	- 0.05
<b>2.25 &gt; 2.50</b>	- 0.10
<b>2.75 &gt; 3.00</b>	- 0.15 of Randtorisch (R.T)
<b>3.25 &gt; 3.50</b>	- 0.20 R.T of Exception
<b>3.75 &gt; 4.00</b>	- 0.25 R.T of Exception
<b>4.25 &gt; 4.50</b>	- 0.30 R.T of Exception

## Diameter keuze

2 mm kleiner dan de verticale corneadiameter.

