

Novakone

ZACHT

De zachte lens voor alle stadia van keratoconus en Pellucid Marginale Degeneratie

☉ Sferisch

☉ Torisch

NOVAKONE®

De zachte contactlens voor keratoconus.

TOEPASSING

De Novakone lens is een oplossing voor alle vormen van keratoconus met het comfort van een zachte lens, inclusief cylindercorrectie tot -10.00, samen met een eenvoudige aanpasmethode. De contactlens is geïndiceerd voor visuele correctie voor alle stadia van keratoconus en Pellucid marginale degeneratie (PMD). Tevens is de contactlens vooral geschikt voor patiënten met een gevorderde stadia van keratoconus, een intolerantie voor vormstabiel of bij niet succesvol gebruik van hybride of sclerale lenzen.

VOORDELEN

- + Een hoger niveau van comfort dan de meeste vormstabiele of hybride lenzen
- + Uitstekende visuele resultaten
- + Mooie aanvulling op andere vormen van correctie
- + Eenvoudige aanpasmethode
- + De optie voor 3 maandelijks vervanging

GEBRUIKSDUUR

3 maanden

Parameters

B.C.R.	5.00 - 9.50 per 0.10 oplopend
STERKTE	+/- 40.00 per 0.25 oplopend
LENSDIAMETER	13.00 - 16.00 per 0.10 oplopend
PERIFERE CURVE	5.00 - 9.50 per 0.10 oplopend
MATERIAAL	Benz G4X 54%, Hioxifilcon D
CYLINDER	-0.25/-15.00 per 0.25 oplopend
AS	1° tot 180° in stappen van 1°
IT FACTOR	(Index of Thickness) 1 t/m 4, standaard = 0

Aanpas-advies

Bij het aanmeten van een Novakone is het doel om het centrale aangetaste hoornvlies optisch zo goed als mogelijk te corrigeren met behulp van de basis-curve en een zo 'normaal' mogelijke perifere curve en sclera passing gelijk aan de manier zoals een zachte lens wordt aangepast. Bepaal of een correctie nodig is op de perifere passing, aangezien er slechts één paslens per B.C.R. aanwezig is in de paset. Het gebruik van paslenzen is absoluut noodzakelijk om de correcte lenzen te bestellen.

