

# Multifocaal / Prestige

De multifocale lens met een progressief oplopende perifere leessterkte en een groot vertegebied

variant

## TOEPASSING

Bij beginnende leesklachten.

## VOORDELEN

- + Geen beperking in parameters
- + Zeer goed toepasbaar op bijna alle binnen geometrieën
- + Vanaf het centrale vertedeel een in het begin langzaam toenemende positieve sterkte zodat een effectief groter scherptegebied voor veraf zien aanwezig is
- + De tussenafstand wordt door de natuurlijke beweging van de contactlens zonder zoeken gevonden, zodat verticale hoofdbewegingen veel minder nodig zijn
- + Geen storende reflexbeelden op de rand van het centrale vertedeel omdat de vertesterkte niet abrupt in de leessterkte overgaat, dus beter nachtzicht
- + In combinatie met een variabele excentriciteit van de binnen perifere wordt een progressieve leessterkte op de juiste plaats gevormd tijdens het lezen
- + Een normale parallelpassing
- + De Prestige multifocale contactlens is rotatie ongevoelig en heeft dus geen storende balansconstructie of balansprisma nodig

 (1) **Oogpositie normaal**

 (2) **Onderooglid hoge positie**

 (3) **Onderooglid lage positie**

 (4) **Bovenooglid te hoge positie**

## GEBRUIKSDUUR

12 - 24 maanden

(afhankelijk van het gekozen materiaal)

 [www.ucocontactlenzen.nl](http://www.ucocontactlenzen.nl)  [order@ucocontactlenzen.nl](mailto:order@ucocontactlenzen.nl)  0227 601837

## Parameters

<b>B.C.R.</b>	7.00 - 8.50 per 0.05 oplopend
<b>LENSDIAMETER</b>	9.00 - 12.00 per 0.10 oplopend
<b>ADDITIE</b>	t/m +3.00 per 0.25 oplopend

## Aanpas-advies

Opgave parameters van bestaande - of paslenzen met daarbij de aanvulling van onderstaande gegevens.

### Resultaat

#### RECHTS/LINKS

**Verzien** - visus

**Tussenafstand** - visus

**Lezen** - visus

Centrerings goed

Beweging goed

High riding    Low riding

*licht*

*middel*

*hardnekkig*

Last van halo's

Blijft onder het bovenste

ooglid hangen

Zakt tijdens het lezen

onder het ooglid

## Tips voor het aanmeten

Het is belangrijk dat de lens voldoende in leespositie komt en dat het ooglid de lens omhoog duwt wanneer er naar beneden wordt gekeken.



UCO  
CONTACTLENZEN  
HOLLANDE AMBACHT